

再使用禁止

## Tanzoワイヤー

### 【禁忌・禁止】\*

- 再使用禁止
- ニッケル等の成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- 金属疲労等により破折することがある。その際はただちに歯科医師の診断を受けさせること。

### 【使用目的又は効果】

歯の移動又は維持のために歯に力を加えること。


### 【使用方法等】

歯又はバンドに直接装着したブラケット等に装着し、歯の移動を行う。

### 【形状・構造及び原理等】

本品はタイプ2のワイヤーであり、原材料は次のとおり。  
・Ni49,Ti45, Cu6, 他微量 (W%)

(構造等)

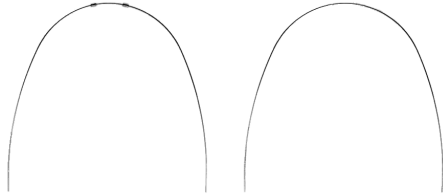

ワイヤーの断面寸法

丸型 .013 ~ .018インチ (.33 ~ .43mm)

角型 高さ .014 ~ .021インチ (.36 ~ .53mm)

幅 .016 ~ .025インチ (.41 ~ .64mm)

### 【使用上の注意】\*

1) 使用注意

- ① 同じ箇所ワイヤーを繰り返し曲げると破折の原因になるので、行わないこと。
- ② ワイヤーを切断する際は専用の器具を用いて慎重に行い、ワイヤー切断面や切片で粘膜を傷つけることの無いよう、適切な処置を施すこと。
- ③ ストップ付ワイヤーのストップが、輸送中に外れるときがある。その場合は、装着前にワイヤーへ通し直すこと。

2) 重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント  
電話番号 : 03-5604-0980  
FAX番号 : 03-3801-7560  
輸入先国名 : アメリカ合衆国  
製造業者 : American Orthodontics  
アメリカンオーソドンティックス