

再使用禁止

エンパワー2*

【禁忌・禁止】
 ・再使用禁止
 ・ニッケル等の金属成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
 ・使用状況により脱落・破折・クリップ外れが起こる場合がある。その際はただちに歯科医師の診断を受けさせること。

【使用目的又は効果】
 歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。


【形状・構造及び原理等】**
 本品は矯正歯科治療に用いるアタッチメントであり、チューブ(DBタイプとウェルドタイプ)及びブラケットに大別される。

【使用方法等】
 ①取りつける歯面の位置及び方向を確認する。
 ②歯面の清掃、接着前処理を行う。(ウェルドタイプの場合はバンドを清掃する)
 ③本品の裏側に汚れが付着していないことを確認し、歯面(バンド)に取りつける。
 ④取りつけたら、カラーコードを取り除く。
 ⑤クリップを開きワイヤーを装着する。
 ⑥クリップを閉じる。
 《クリップ開閉方法》(左図参照)
 ※開閉には必ず、専用のインスツルメント(エンパワーインスツルメント)を使用すること。
 ①(開け方)ブラケットにはシングル側を、チューブにはダブル側を用い、指を添えながら、クリップを咬合側に向かって、ゆっくりスライドさせる。
 ②(閉じ方)スロットの中にワイヤーが収まっていることを確認する。指を用いて、クリップを歯肉側に向かって、ゆっくりとスライドさせる。

原材料:ステンレス鋼(ブラケット本体・チューブ本体)
 コバルト合金(クリップ)

原理:本品は、歯科用接着材により歯面に接着されたのち、スロットに装着されたメインアーチワイヤーにより、矯正力を付与することで歯を移動させる。

(構造等)

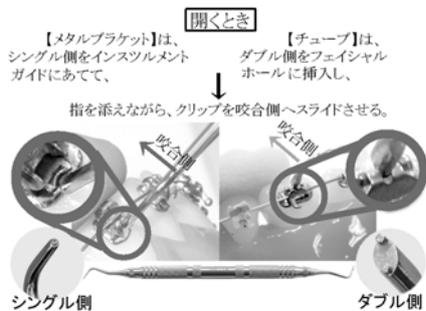

閉じるとき

ワイヤーをセットし、スロット内にワイヤーが収まっていることを確認してから、歯肉側へ向かって、指でゆっくりスライドさせる。



【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①ブラケット等を撤去する際は急激に引っ張ったりせず慎重に行うこと。
 - ②脱落・破折・クリップ外れは誤飲・誤嚥につながる可能性があるので施術の際は細心の注意を払って行い、診療後にも脱落等があり得ることを患者に説明しておくこと。誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院にかかるよう伝えておくこと。
 - ③ウェルドチューブは、ウェルディングが完了するまでクリップを開閉しないこと。(ウェルディングの前にクリップを開閉すると、クリップが外れてしまうことがある。)
- 2) 「クリップ操作上の注意」
 - クリップがスムーズに動かない場合は次の原因が考えられるため、これらの原因を除去してから操作すること。
 - 【クリップの動きを妨げる原因】;
 - ・ワイヤーの浮き
 - ・動かす方向が曲がっている(：ねじれ、回転)
 - ・接着材やブラケットの付着
 - ・速い動作
 - ※上記の原因を除去しても動きにくい時はクリップの変形が考えられ危険であるため、使用せず、ブラケット(又はチューブ)を交換すること。
 - ※クリップには薄い金属を使用しているため、開け閉めを繰り返すと金属疲労により、破損することがある。破損してしまったら新しいブラケット(又はチューブ)へ交換すること。
- 3) 重要な基本的注意
 - 本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
 電話番号 : 03-5604-0980
 FAX番号 : 03-3801-7560
 輸入先国名 : アメリカ合衆国
 製造業者 : American Orthodontics
 アメリカンオーソドンティックス