

エンパワークリア

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・ニッケル等の成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- ・使用状況により、脱落・変形が起こる場合がある。その際は、ただちに歯科医師の診断を受けさせること。

【形状・構造及び原理等】**

- 本品は、次の原材料で構成する。
- ・ブラケット本体:サファイア(酸化アルミニウム)
 - ・クリップ本体:コバルト合金
 - ・クリップコーティング:ロジウム

(構造等)

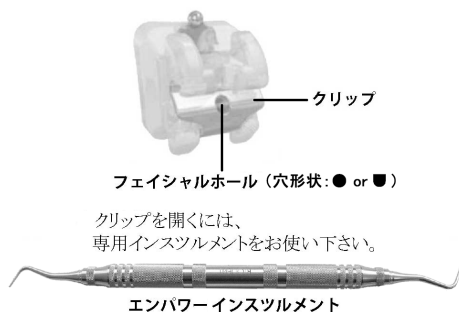

開くとき

ダブル側をフェイシャルホールに挿入し、指を添えながら、クリップを咬合側へスライドさせる。



閉じるとき

ワイヤーがスロットに収まっていることを確認してから、歯肉側に向かって指でスライドさせる。



【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いること。

【使用方法等】

- (1) 接着する歯面の位置及び方向を確認する。
- (2) 接着剤の指示に従って歯面の清掃、接着前処理を行う。
- (3) ボンディングベースに汚れが付着していないことを確認し、歯面に接着する。
- (4) 接着剤が十分に硬化したら、カラーコードを取り除く。
- (5) クリップを開きワイヤーを装着する。
- (6) クリップを閉じる。

《クリップ開閉方法》(左図参照)

※開閉には必ず、専用のインスツルメント(エンパワーインスツルメント)を使用すること。

- (1) (開け方) ダブル側を用い、指を添えながら、クリップを咬合側に向かってゆっくりスライドさせる。 ※シングル側は主にメタルブラケット用です。
- (2) (閉じ方) スロットの中にワイヤーが収まっていることを確認する。指を用いて、クリップを歯肉側に向かって、ゆっくりとスライドさせる。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
(1) 本品の脱落や歯の摩耗を防ぐため、対合歯に接触しないように接着すること。
(2) 脱落・変形が起こった場合は、使用せず新しいものに交換すること。
(3) ディボンディングの際は、撤去専用のプライヤーを使用し、慎重に行うこと。

2) クリップ操作上の注意

クリップがスムーズに動かない場合は次の原因が考えられます。これらの原因を除去してから操作して下さい。

【クリップの動きを妨げる原因】

- ・ワイヤーの浮き
- ・開閉方向のねじれ
- ・接着剤やブラークの付着
- ・急激な開閉操作

※上記の原因を除去しても動きにくい時は、クリップの変形が考えられません。その際は使用を中止し、新しいブラケットに交換して下さい。
※クリップには薄い金属を使用しているため、開け閉めを繰り返すと金属疲労により、破損することがあります。この場合も新しいブラケットへ交換して下さい。

3) 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- (2) 口腔内での脱落・破折・クリップ外れは、誤飲・誤嚥につながる可能性があるため、施術の際は細心の注意を払って行うこと。また、診療後にも脱落等があり得ることを患者に説明しておくこと。誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院へかかるよう伝えておくこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
電話番号 : 03-5604-0980
FAX番号 : 03-3801-7560
輸入先国名 : アメリカ合衆国
製造業者 : American Orthodontics
アメリカンオーソドンティックス